







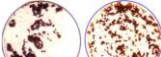


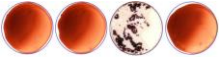



Avläsning av resultat

Förekomsten eller frånvaron av agglutination anger din blodgrupp.

Agglutinationer kan kan variera i utseende och styrka; se exempel nedan. De möjliga kombinationerna av agglutination samt de korresponderande blodgrupperna anges i tabellen till höger. I de fall testet påvisar en svag agglutination bör blodgruppsbestämningen göras om. I de fall en agglutination kan påvisas i testets kontrollfält är resultatet ogiltigt.

O RhD Pos		O RhD Neg	
A RhD Pos		A RhD Neg	
B RhD Pos		B RhD Neg	
AB RhD Pos		AB RhD Neg	
   		Ogiltigt	

Exempel på agglutinationer:

Förvaring och hållbarhet

Förpackningarna med EldonKort består av ett fuktätt aluminium/plastlaminat som skyddar korten mot fukt. EldonKorten bör förvaras mellan 5 och 37 °C (41 och 99 °F). Med förvaring inom denna temperaturintervall håller korten i två år. Utgångsdatum (se "Symboler") är tryckt på etiketten i formatet åååå-mm-dd. Korten bör användas innan sista utgångsdatum.






Försiktighetsåtgärder








Ett litet antal personer har svaga RhD antigener på blodcellerna, vilket innebär att agglutinationer kan vara svåra att utläsa. Endast specialiserade laboratorier kan med säkerhet påvisa sådana svaga RhD antigener. I sällsynta fall kan specifika agglutinationer utvecklas i närvaro av vissa proteiner. I händelse av detta blir eventuella agglutinationer synliga i kontrollcirkeln, vilket innebär ett ogiltigt resultat och testet bör göras om. Eventuellt kan din blodgrupp enbart avgöras av ett speciallaboratorium. Bör förvaras utom räckhåll för barn. Efter du har utläst ditt resultat så läggs alla delar i originalförpackningen och slängs med hushållssoporna.

EldonKorten levereras i fuktäta förpackningar. Väl öppnade bör EldonKorten användas samma dag.

WARNING: Resultatet av detta test får aldrig användas som enda underlag för medicinsk behandling. Kontakta din läkare innan du fattar några beslut.

Använda symboler:

Symbol	Betydelse
	Partinumner, Batchkod. Partinumret på EldonKorten anger tillverkningsveckan. Det består av fem siffror, ååvxx, där åå är de två sista siffrorna i året (18 för 2018), vv är veckonumret, och x är ett internt nummer.
	Innehållet räcker till <n> tester.
	Endast för engångsbruk. Får inte återanvändas
	Det runda fältet innehåller en intorkad formel av blodgrupp antikropp A.
	Det runda fältet innehåller en intorkad formel av blodgrupp antikropp B.

Symbol	Betydelse
	Läs bruksanvisningen (detta papper).
	Temperaturgränser. EldonKorten bör förvaras mellan 5 och 37 °C.
	Använd före, eller sista utgångsdatum. Anges som ååå-mm-dd, dvs. 2020-08-28 betyder "Använd före 28 augusti 2020".
	Spåringsnummer. Ange detta nummer och partinumret vid reklamation.
	Tillverkningsdatum. Det datum då EldonKorten förpackades.
	Tillverkare.
	Det runda fältet innehåller en intorkad formel av blodgrupp antikropp D.



ELDON BIOLOGICALS A/S

Sandtoften 10, DK-2820 Gentofte, Denmark
www.eldoncard.com

Copyright©

ELDON™ HEMMASATS HKA 2511

Ta reda på din blodgrupp

Bruksanvisning för No. 441-sv (rev. 2020-06-16)

Användningsområde

ELDON HEMMAKIT 2511 är ett självtest för att avgöra din blodgrupp inom AB0- and RhD blodgruppssystemen på ett ELDONKORT 2511 med ett test per kort.

Blodgruppssystem

ABO-systemet klassificerar blodet i fyra möjliga blodgrupper: A, B, AB och O. RhD-gruppen av rhesus-systemet klassificerar blodet som antingen positivt (RhD-pos) eller negativt (RhD-neg). Om blod av en blodtyp blandas med blod av en annan blodtyp kommer klumpar att formas, dvs. agglutinationer, vilket gäller för alla blodgrupper utom 0 RhD neg som inte agglutineras med någon annan blodgrupp. Genom att blanda ditt blod med specifika monoklonala antikroppar på ett EldonKort kan din blodgrupp avgöras.

Dina gener avgör din blodtyp. Det är möjligt att avgöra blodgrupp med hjälp av EldonKort från en ungefärlig ålder på 12 månader. Din blodgrupp är detsamma under hela ditt liv.

Hur fungerar EldonKorten?

De torkade reagenserna med antikroppar ses som cirklar på EldonKorten där färgen grön representerar Anti-A, färgen röd representerar Anti-B och färgen gul representerar Anti-D. En kontrollcirkel med en blå prick indikerar att resultatet är giltigt.

Testet utförs genom att lösa upp de torkade reagenserna i varje cirkel med en droppe vatten och blanda det med blod. Det är viktigt att få tillräcklig mängd blod och att undvika överföring av vätska mellan de fyra cirkelarna. För detta ändamål använder du fyra EldonStickor för att överföra blod till varje cirkel och för att röra om vätskan ordentligt. Nedanstående steg är essentiella för att slutföra testet.

Innehåll

Se testets etikett.

Medföljer inte


- Ett glas med vatten.
- En klocka eller en timer.

Viktig information



- Läs noga igenom bruksanvisningen innan du gör testet.
- Följ instruktionerna noggrant för att få ett tillförlitligt resultat. En instruktionsvideo finns tillgänglig på www.eldoncard.com.
- Detta test kan användas till endast en blodgruppsbestämning per ELDONKORT 2511.
- Detta test kan inte återanvändas.
- Förvara i rumstemperatur (5 – 37 °C (41 och 99 °F)). Utom räckhåll för barn.
- Låt inte andra personer komma i kontakt med ditt blod. Det kan innebära en smittorisk.
- Bör inte användas av personer med blödarsjuka.
- Testet bör användas före utgångsdatum.
- Om något av innehållet saknas, är skadat eller öppnat ska du inte använda testet utan lämna in den till det försäljningsställe där du köpte den.
- Öppna inte förpackningen innan du är redo att göra testet. Väl öppnat bör ELDONKORTET 2511 användas samma dag.
- Kontrollera alltid att de färgade plättarna är ungefär lika stora i alla fält.
- Kom ihåg att separera EldonStickorna så att de är uppdelade i fyra individuella stickor.
- En EldonSticka får endast användas i ett fält. För varje cirkel – använd en ny EldonSticka.
- Tvätta och torka händerna noga innan du sticker dig i fingret i steg 6.
- Testa inte lansetten före användning. Nålen kan bara utlösas en gång.
- Undvik överföring av vätska mellan cirkelarna.

Utförande av ELDON BLODGRUPPSTEST

Öppna förpackningen, samla materialet och läs instruktionerna innan du börjar!


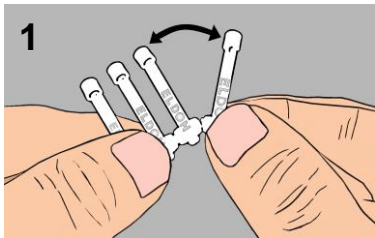


Steg 1 Separera stickorna så att de är uppdelade i fyra individuella stickor innan användning (använd en för varje cirkel). Skriv sen personlig info på EldonKortet.

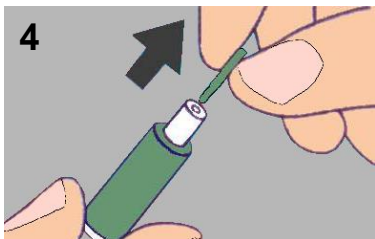
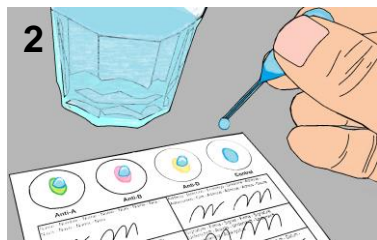


Steg 4 Dra av toppen på lancetten.


Aktivera inte lansetten; nålen kan bara utlösas en gång.

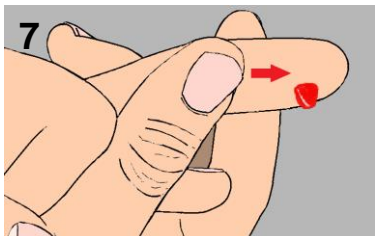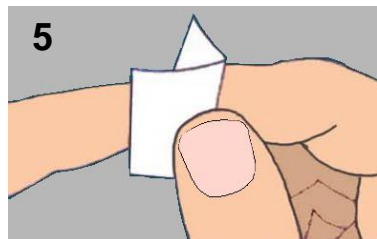

Steg 7 Massera ditt finger mot din fingertopp för att öka blodflöde. Bibehåll trycket på ditt finger när blodet börjar flöda.

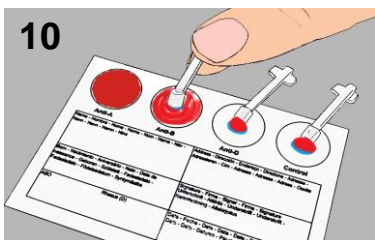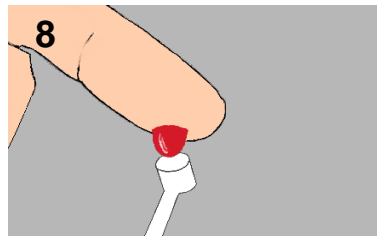

Steg 10 Varje cirkel bör omröras med korrekt EldonSticka i 10 sekunder. Blod, vatten och reagensämne bör mixas varsamt inom hela cirkeln. **Undvik överföring av vätska mellan cirkelarna.**

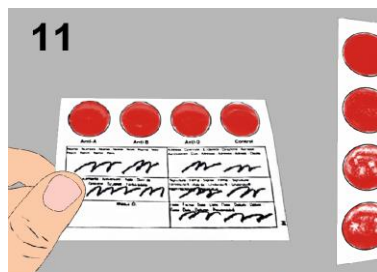

10 sec + 10 sec



Steg 12 Avläs helst resultat innan kortet har torkat. Notera din blodgrupp på kortet. Efter torkning, använd EldonFoil för att täcka kortet (aldrig innan helt torr).


Steg 2 Rör inte de färgade reagensämnen med pipetten. Applicera en droppe vatten på de färgade reagensprickarna i varje cirkel.

Undvik överföring av vätska mellan cirklarna.

Steg 5 Rengör ditt finger med den sterila servetten. Svunga din arm för att öka blodflödet till ditt finger.


Steg 8 Fortsätt pressa tills du har en bloddroppe i storlek 3-4 mm. i diameter.

Låt droppen falla på en EldonSticka.

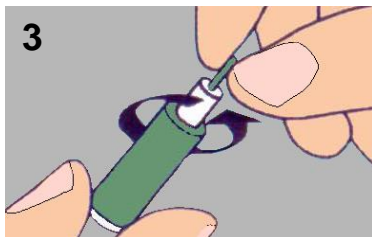


Steg 3 Ta lancetten och vrid på den färgade spetsen.

Aktivera inte lancetten; nålen kan bara utlösas en gång.

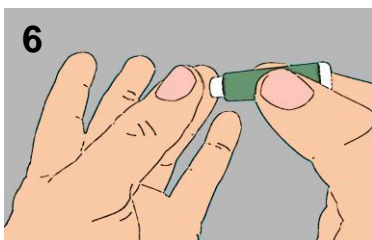

Steg 6 Sträck och punktera det mjuka skinet på sidan av din fingertopp genom att trycka lancetten bestämt mot din hud.

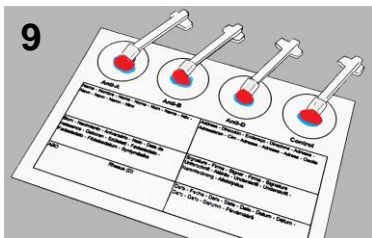

Steg 9 Placera stickan med blodet i mitten av den första reagenscirkeln (blodet ska röra vattnet som applicerades i steg 2).

Ta en ny sticka och upprepa snabbt steg 7 och 8. Överför en droppe blod till var och en av de kvarvarande cirklarna med en ny sticka för varje cirkel.



Steg 11 Vrid kortet till en nästan lodrät ställning (ca. 45° vridning). Håll kortet i ca 10 sekunder i varje lutning.

Sluta inte när du ser de första reaktionerna; RhD-reaktionerna är ofta långsammare än A och B.

+ 10 sec + 10 sec = 40 sec

Scanna för att se instruktionsvideo*

Scanna QR-koden eller gå till <https://www.eldoncard.com/How-to-use-video> för att se ELDON HEMMATEST instruktionsvideo.

* Standardkostnad för meddelanden och data kan komma att tillämpas. Läs alltid instruktionerna innan användning.

